



# DENTO-VIRACTIS INSTRUMENTS 53+ READY TO USE

# DENTO-VIRACTIS

Descripción	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL : Solución lista para usar a base de Glutaraldehído
	
Áreas de aplicación	Para la desinfección final por inmersión de productos sanitarios termosensibles reutilizables, semicríticos y críticos, invasivos y no invasivos previamente limpiados. SOLO PARA USO PROFESIONAL
Características	Solución lista para usar (5 L)
Presentación comercial	Bidón de 5 litros de solución lista para usar
Composición	Glutaral (glutaraldehído) 2%, tampón pH, tensioactivo no iónico, colorante.
Accesorio obligatorio	Accesorio obligatorio tiras reactivas para la solución DENTO-VIRACTIS 53+ RTU (3175972) durante 7 días (Francia) o 30 días (internacional) Compruebe regularmente la validez del baño de desinfección

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS : Condiciones de limpieza – 20°C			Tiempo de contacto
Bactericida	EN 13727 EN 14561	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae</i>	10 min.
Fungicida	EN 13624 EN 14562	<i>Candida albicans, Aspergillus brasiliensis</i>	10 min.
Tuberculocida	EN 14348 EN 14563	<i>Mycobacterium terrae</i>	10 min.
Micobactericida	EN 14348 EN 14563	<i>Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium</i>	15 min.
Virucida	EN 14476	<i>Poliovirus Adénovirus, Norovirus</i>	10 min.
	EN 17111	<i>Norovirus, Adénovirus</i>	
Esporicida contra <i>Clostridium difficile</i>	EN 17126	<i>Clostridium difficile</i>	30 min.
Esporicida	EN 17126	<i>Bacillus cereus, Bacillus subtilis</i>	90 min

CADENCE

@ : [qualite@cadence-global.fr](mailto:qualite@cadence-global.fr)  
Tel. +33 (0)1 45 91 31 82



# DENTO-VIRACTIS INSTRUMENTS 53+ READY TO USE +

# DENTO-VIRACTIS

<b>Instrucciones de uso</b>	<p>Para Francia : DENTO-VIRACTIS 53+ RTU puede utilizarse durante un máximo de 7 días. Para internacional: DENTO-VIRACTIS 53+ RTU puede utilizarse durante un máximo de 30 días. Controlar regularmente la validez del baño con las tiras de control. Antes de utilizar DENTO-VIRACTIS 53+ RTU realizar una prelimpieza o limpieza mecánica completa y un aclarado intermedio de los productos sanitarios a tratar. Cuando se use por primera vez, retirar el anillo de inviolabilidad y luego desenroscar el tapón.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Desenroscar el tapón del bidón y transvasar el contenido a la bandeja. Volver a cerrar el bidón después de su uso.</li><li>2. Colocar los productos sanitarios abiertos y desmontados en la solución y asegurarse de que estén totalmente sumergidos. Asegurar la irrigación de los canales si están presentes. Cubrir la bandeja.</li><li>3. Tiempo de contacto : a partir de 15 min. según el espectro de actividad deseado.</li><li>4. Aclarar cuidadosamente con agua estéril o ltrada (0,2 µm) antes de volver a utilizarlo.</li><li>5. Antes de almacenar, secar los productos mediante aire médico sobre una superficie seca limpiada previamente.</li></ol>
<b>Precauciones de uso</b>	<p><b>PELIGRO.</b> Contiene : Glutaral. Corrosivo para las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave. Nocivo en caso de inhalación. Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Puede irritar las vías respiratorias. Evitar respirar los vapores. Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente tras la manipulación. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar guantes de protección, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara. <b>EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL :</b> Lavar con abundante agua. <b>EN CASO DE INHALACIÓN :</b> Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. <b>EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS :</b> Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA, médico si la persona se encuentra mal. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA, un médico. Guardar bajo llave. - Utilizar guantes de manga larga. Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con la normativa local. No mezclar con otros productos. Utilizar un aparato respiratorio adecuado si no hay suficiente ventilación. Antes de usar, comprobar la fecha de caducidad que figura en la etiqueta. Cualquier incidente grave relacionado con el producto sanitario debería comunicarse al distribuidor y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o paciente.</p>
<b>Etiquetado</b>	<p><b>UFI : 7E59-20CR-E00S-PYX6</b></p>

Obtención de la marca CE0459 en 2025. Clase IIb DM.  
Fabricante : SODEL - 190 rue René Barthélemy - 14100 Lisieux - France  
Versión 1 – 04/2025

**CADENCE**  
@ : [qualite@cadence-global.fr](mailto:qualite@cadence-global.fr)  
Tel. +33 (0)1 45 91 31 82