



Fiche Técnica

Designación	HIPOCLORITO SODICO
Referencias	I-204
Visual	
Descripción	- Solución líquida para irrigación y desbridamiento de conductos radiculares. - El hipoclorito de sodio es una solución acuosa de hipoclorito de sodio. - A baja concentración, disuelve principalmente el tejido necrótico; en concentraciones más altas también destruye tejidos vitales.
Características	Procedimiento: ✓ Esta solución está indicada para irrigación y desbridamiento de conductos radiculares durante el tratamiento endodóntico. Elimine los lodos con una solución de irrigación adecuada como EDTA o 12.5% de ácido cítrico. ✓ Reservado para uso profesional. Instrucciones: Durante la preparación del canal, irrigue tanto como sea necesario con la solución de hipoclorito de sodio. ✓ Llene la jeringa con hipoclorito de sodio (cantidad recomendada: 10 ml). ✓ Sujete firmemente la aguja de irrigación a la jeringa. ✓ Irrigue tanto como sea necesario. ✓ Retire la aguja de irrigación y coloque la jeringa y la aguja en un contenedor de desechos para la actividad de atención de riesgos infecciosos. Precauciones de empleo: ✓ Lea la Hoja de datos de seguridad del material para manejar el producto y para obtener información de seguridad. ✓ No irrigar directamente la región apical. ✓ Evite extender el producto en los tejidos periféricos. ✓ Evite extender el producto sobre superficies y materiales de color porque el hipoclorito de sodio es una solución moderadamente alcalina con un efecto blanqueador. Advertencias: ✓ ¡Précaution, producto corrosivo! ✓ Manténgalo fuera del alcance de los niños. ✓ Evite el contacto con la piel y los ojos.
Composición	Hipoclorito de sodico 2.5% Agua y sustancia de relleno 97.5%
Contenido	500 ml
Almacenamiento	Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar seco, alejado del calor y la luz solar directa.
Informaciones legales	Dispositivo médico de clase IIa. Marcado CE 0537. Organismo certificador EUROFINs EXPERT SERVICES Fabricante MAGNUM SA

Version 2.0
Mise à jour par RG