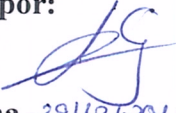
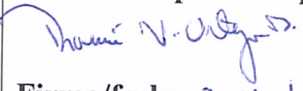


 Laboratorios Clarben S.A.	TÍTULO:	SILANO	CÓDIGO: FT-SGC027.01
			REEMPLAZA: R1
	FECHA DE EMISIÓN:	29/DIC/2016	No. PÁG.: 1 de 3

CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD
3. CLASIFICACIÓN SEGÚN DIRECTIVA 93/42/CE
4. PRESENTACIÓN
5. NÚMERO DE REFERENCIA
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS
8. IMAGEN

Realizado por:  Firma/fecha 29/12/2016	Revisado/Aprobado por:  Firma/fecha 29/12/2016
---	--

Queda prohibida la divulgación, utilización, reproducción total o parcial de su contenido sin previa autorización formal expedido por **Laboratorios Clarben, S.A.**

SILANO	CÓDIGO: FT-SGC2701
	No. PÁG.: 2 de 3

1. CARACTERÍSTICAS

El SILANO es un material monocomponente que se utiliza para promover la adhesión entre resinas orgánicas y porcelana.

Se aplica después de grabar con ácido fluorhídrico la porcelana.

Para obtener los resultados deseados, la superficie de porcelana que desea grabar deberá estar completamente seca y libre de humedad residual antes de la aplicación del Silano

2. FINALIDAD

Facilitar el enlace entre el composite y otras resinas orgánicas a la porcelana

3. CLASIFICACIÓN SEGÚN DIRECTIVA 93/42/CE

Producto sanitario Clase IIA.

4. PRESENTACIÓN

SILANO KIT

- 4 jeringas de 1,2 ml.
- 8 cánulas aplicadoras

5. NÚMERO DE REFERENCIA

Ref: 04-021

6. MODO DE EMPLEO

- Siga cuidadosamente las instrucciones del KIT DE PREPARACIÓN DE PORCELANA para grabar la superficie de porcelana. Enjuague y seque.
- Aplique DRY RITE, agente de secado, sobre la superficie para asegurar que el secado haya sido perfecto. Cualquier humedad residual afectará negativamente la adhesión.
- Coloque la aguja en la jeringa de SILANO y aplique el SILANO sobre la superficie de porcelana tratada.
- Déjelo secar durante un minuto. Si no se ha secado en ese tiempo, utilice aire limpio y seco con presión ligera. Tape inmediatamente la jeringa de SILANO.
- A fin de controlar la calidad del aire, haga una prueba sobre la superficie de un espejo dental.
- Si aparecen marcas o gotitas de agua, no deberá usarse este aire para el procedimiento.
- Mantenga un campo limpio y seco y aplique cemento dual para el cementado.

7. ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Conservar entre 27-5 °C

Visado DT: 

- Para más información consultar la Hoja de Seguridad.

8. IMAGEN



